

Dosiertabelle gigasept® pearls

schülke 

Dosierbecher: 100 g Granulat \triangleq 150 ml

1 gehäufter Dosierlöffel \triangleq 40 g Granulat \triangleq 60 ml

Liter Lösung	Konzentration der Gebrauchslösung	
	1 %	2 %
1 Liter	15 ml (\triangleq 10 g)	30 ml (\triangleq 20 g)
2 Liter	30 ml (\triangleq 20 g)	60 ml (\triangleq 40 g)
4 Liter	60 ml (\triangleq 40 g)	120 ml (\triangleq 80 g)
8 Liter	120 ml (\triangleq 80 g)	240 ml (\triangleq 160 g)
10 Liter	150 ml (\triangleq 100 g)	300 ml (\triangleq 200 g)
20 Liter	300 ml (\triangleq 200 g)	600 ml (\triangleq 400 g)
30 Liter	450 ml (\triangleq 300 g)	900 ml (\triangleq 600 g)

Anwendungshinweise:

Wasser vorlegen. Dem Wasservolumen entsprechende Granulatmenge mit Dosierbecher/-löffel einstreuen. Während der ersten 15 Minuten mehrfach umrühren, im Anschluss an diese Aktivierungszeit ist die Gebrauchslösung einsatzbereit. Gemäß RKI Empfehlung Gebrauchslösung arbeitstäglich und bei deutlich sichtbarer Kontamination erneuern.