

schülke -+



Innovative Einmal-Feuchttuchspendersysteme für den Einsatz von Flächendesinfektionsmitteln. Optimaler Schutz vor Kontamination durch das safe & easy Konzept.

schülke wipes safe&easy

Unser Plus

- innovative Feuchttuchspendersysteme
- keine Aufbereitung mehr notwendig
- Komplett-Entsorgung des bagless-Systems
- Kontaminationsschutz durch kleine Öffnung und extra Staubschutz
- sehr einfache Handhabung
- Medizinprodukt

Anwendungsgebiete

Die schülke wipes safe & easy können mit ausgewählten Desinfektionsmitteln (gebrauchsfertig oder angesetzte Lösung aus Konzentrat) getränkt werden. Je nach Auswahl der Flüssiglösung eignen sich die Systeme sowohl zur Reinigung oder Desinfektion von nicht-invasiven Medizinprodukten und/oder Flächen aller Art. Ideal geeignet für den Einsatz in Bereichen, in denen ein besonders grosses Risiko der Übertragung von pathogenen Keimen besteht, wie u. a. Isolierzimmer, OP oder Neonatologie. Patientennahe Flächen und Flächen mit häufigem Hand- oder Hautkontakt stehen im Fokus der Anwendung.

safe & easy bag-in-box system - Einmalverwendung der wipes in schützendem Beutel + stabiler Eimer zur Mehrfachverwendung

safe & easy bagless system - komplettes Einwegsystem für höchste Hygieneansprüche

safe - weil das Kontaminationsrisiko der Systeme durch nur einmalige Nutzung der Behältnisse signifikant minimiert wird

easy - weil das Handling besonders einfach ist



CE



schülke wipes safe&easy

Besondere Hinweise

Befüllung unter hygienischen Bedingungen

Zunächst die Hände desinfizieren und frische Schutzhandschuhe und Kittel anziehen. Bitte während des Befüllungsvorgangs darauf achten, dass die Handschuhe nicht durch andere Tätigkeiten kontaminiert werden. Giessen Sie 2 Liter bei gebrauchsfertiger Lösung oder 3 Liter (schülke wipes safe & easy bag-in-box system) / 2,5 Liter (schülke wipes safe & easy bagless system) Gebrauchslösung aus einem angesetzten Konzentrat langsam spiralförmig über die Tücher. Verwenden Sie hierzu nur die von schülke empfohlenen Präparate und Konzentrationen. Fädeln Sie das innerste Tuch der Rolle in die sternförmige Entnahmeöffnung des Deckels ein und verschrauben Sie den Deckel fest. Die Tücher sind nach 30 Minuten Wartezeit vollständig durchtränkt und gebrauchsfertig. Dokumentieren Sie in der Zwischenzeit den Präparatenamen, die gewählte Einsatzkonzentration, die Einwirkzeit und das Befülldatum auf dem Siegeletikett. Kleben Sie dieses auf das vorgesehene Feld.

Sichtbare Verunreinigungen vor der Desinfektion entfernen. Die zu desinfizierende Fläche gründlich mit dem vorgetränkten Vliestuch abwischen und auf eine vollständige Benetzung achten. Nicht zur Desinfektion von invasiven Medizinprodukten geeignet. Bei allen getesteten schülke Produkten beträgt die Standzeit bis zu 28 Tage. Ausgetrocknete Tücher nicht mehr verwenden. Um ein Austrocknen der Tücher zu vermeiden, nach jeder Tuchentnahme den Deckel fest verschliessen. Einwirkzeiten und etwaigen besonderen Anwendungshinweise für die sichere Anwendung sind der Gebrauchsanweisung der Desinfektionsmittel zu entnehmen. Weitere Wirksamkeiten entnehmen Sie bitte dem jeweils eingesetzten Desinfektionsmittel. Die Angaben des Herstellers der verwendeten Desinfektionspräparate zu Einwirkzeiten, Einsatzkonzentrationen und Hinweise zum Wirkspektrum sind zu beachten.

Die abgebildeten Anwendungspläne (#2816 schülke wipes safe & easy bag-in-box; #900825 schülke wipes safe & easy bagless) können Sie über unsere Website www.safe-and-easy.com einsehen und abfordern. Nutzen Sie auch die Schulungsvideos im auf unserem "schuelke Channel" auf youtube.

Bestellinformation

Artikel	Lieferform	Art.-Nr.
schülke wipes s&e bagless 130 ST EM	6/Karton	70003177
schülke wipes bagless system 6x130 ST KT	1/Karton	70000034
schülke wipes safe+easy 6x111 ST KT	1/Karton	119544
schülke wipes safe+easy Sp.box 10 ST KT	1/Karton	119542

Verwandte Produkte

- antifact® AF (N)
- antifact® extra
- buraton® rapid
- mikrozyd® AF liquid
- mikrozyd® sensitive liquid
- mikrozyd® universal liquid
- perform® advanced alcohol EP
- perform® classic alcohol EP
- perform® classic concentrate Q-Plus
- schülke wipes
- terralin® protect

Umweltinformation

schülke stellt seine Produkte nach fortschrittlichen, sicheren und umweltschonenden Verfahren wirtschaftlich und unter Einhaltung hoher Qualitätsstandards her.

Gutachten und Information

Einen Überblick zu den Produkten schülke wipes safe&easy finden Sie im Internet unter www.schuelke.ch.

Für individuelle Fragen:

Customer Sales Service

Telefon: +41 44 466 55 44

E-Mail: mail.ch@schuelke.com



Die Schülke & Mayr GmbH ist im Besitz einer Herstellungserlaubnis nach §13 AMG Abs.1 und von GMP-Zertifikaten für Arzneimittel.

schülke Schweiz
Schülke & Mayr AG
Hungerbühlstrasse 22
8500 Frauenfeld
Schweiz
Tel. +41 (0) 44 - 46655 - 44
www.schuelke.ch
mail.ch@schuelke.com

schülke Hauptsitz
Schülke & Mayr GmbH
Robert-Koch-Str. 2
22851 Norderstedt
Deutschland
Tel. +49 (0) 40 - 52100 - 0
Fax +49 (0) 40 - 52100 - 318
www.schuelke.com
mail@schuelke.com