

schülke wipes safe & easy

Recharge sous des conditions d'hygiène optimales.

safe & easy

bag

Remarque

Pour la protection du personnel ainsi que pour la protection des schülke wipes safe & easy, nous recommandons de désinfecter le plan de travail et les mains, ainsi que de porter des blouses, des lunettes et des gants de protection.*



Étape 1


Ouvrez l'étiquette de sécurité auto-adhésive du sachet.

Veillez à travailler dans des conditions hygiéniques, ne contaminez pas les gants pendant le travail!




Étape 2

Collez l'étiquette de sécurité au dos du sachet et remplissez-le complètement.

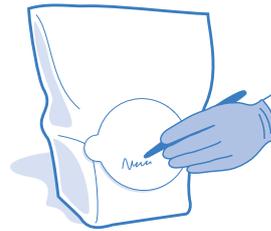

Étape 3

Sortez un morceau de la lingette à l'intérieur du rouleau, versez une fois 2 litres dans le cas d'un produit prêt à l'emploi** ou 3 litres de solution de travail à partir d'un concentré fraîchement préparé*** lentement en spirale sur le rouleau en feutre en sachet.

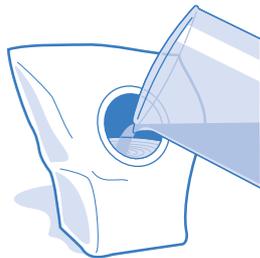

Étape 4

Tirez la lingette à l'intérieur du rouleau de feutre dans l'ouverture de retrait en forme d'étoile de la fermeture et vissez celle-ci au sachet.



Étape 5

Les lingettes sont complètement imbibées après 30 minutes d'attente.

Jetez la première lingette et fermez soigneusement le capuchon de protection.

Attendre 30 Min.



Étape 6

Les schülke wipes safe & easy sont maintenant prêts à l'emploi.



Veillez jeter le sachet avec les éventuels résidus de produit et les lingettes de manière appropriée à la fin de la durée de conservation de 28 jours maximum.

* Selon TRBA 250, paragraphe 4.1.3.

** antifact® N liquid, mikrozyd® AF liquid, mikrozyd® sensitive liquid, mikrozyd® universal liquid, terralin® liquid, buraton® rapid, perform® advanced alcohol EP, perform® classic alcohol EP

*** antifact® AF (N), antifact® extra, pursept® AF, terralin® protect, perform® classic concentrate Q-Plus, TPH protect