

schülke -†



thermosept® NDR est un produit spécial neutre utilisé pour la désinfection et le nettoyage combinés pour le traitement chimiothermique. [CE 0297]

thermosept® NDR

Notre plus

- sans aldéhyde
- désinfection et nettoyage combinés dans un cycle de rinçage
- pH neutre, donc respecte le matériel
- conforme aux exigences du groupe de travail « Installations de décontamination des cadres de lit et des charriots de transport »
- pour les systèmes d'eau fraîche et de renouvellement de l'eau
- sans mousse
- séchage sans tache du matériel à laver

Domaines d'utilisation

Pour le nettoyage, la désinfection et le rinçage chimiothermique des cadres de lit, des charriots de transport, des récipients, des chevets, des tables d'opération dans toutes les installations de lavage courantes pour tous les matériels à laver compatibles avec la machine. Convient également bien au traitement du verre de laboratoire et du matériel de laboratoire.

Conseils d'utilisation

Efficacité microbiologique:

Concentration standard: Avec les paramètres 1 % - 55 °C - 2 min, le produit a une efficacité bactéricide, levuricide et virucide limitée.

Pour réduire le temps de séchage, thermosept® NDR peut être combiné avec le comonent de rinçage thermosept® BSK. L'effet de dilution qui se produit dans les installations de recirculation - en raison du retrait de la solution de rinçage - doit être évité par un post-dosage réglé en conséquence. Ceci est également valable lorsque de l'eau fraîche est ajoutée dans le réservoir. Un changement quotidien du bain de nettoyage désinfectant est nécessaire pour éviter toute perte d'efficacité. Après avoir vidé le bain de nettoyage désinfectant usagé, il est recommandé de nettoyer ou de rincer le réservoir.

Efficacité microbiologique

Efficacité	Solution	Temps d'action
Bactéries EN13727, EN14561 - en conditions de saleté	1 % (10 ml/l) 55 °C	2 min
Levure EN13624, EN14562 - en conditions de saleté	1 % (10 ml/l) 55 °C	2 min
activité virucide limitée EN14476, EN17111 - en conditions de saleté	1 % (10 ml/l) 55 °C	2 min

CE 0297



Données relatives au produit

Composition:

100 g de thermosept® NDR contiennent: 4,0 g de chlorure de diméthyldioctylammonium, 3,0 g de phénoxypropanol

Données physico-chimiques

Couleur	incolore
Densité	env. 1,00 g/cm ³ / 20 °C
pH	6 / 100 % / 20 °C
Point d'éclair	> 100 °C / Méthode: ISO 2719
Routine FORM	liquide
Viscosité dynamique	Donnée non disponible

Remarques particulières

Toujours lire l'étiquette et les informations sur le produit avant utilisation.

Destiné à être utilisé exclusivement par des professionnels. Les incidents graves liés au produit doivent être signalés au fabricant et aux autorités compétentes.

Veillez respecter les conseils techniques d'utilisation des fabricants de machines ainsi que les recommandations de traitement des fabricants de dispositifs médicaux.

Tenir les récipients hermétiquement fermés. Conserver dans le récipient d'origine. Protéger du gel, de la chaleur et des rayons du soleil.

Comment commander

Article	Bon de livraison	N° art.
thermosept NDR -D- 20 l KA	1/jerrycan	144807

Accessoires

Accessoires	N° art.
Kanisterhahn für 5/ 10 l	135501
Kanisterschlüssel 5/ 10 l neutr.	135810
Kanisterschlüssel für 20/ 25 l	135901

Informations environnementales

Schülke fabrique ses produits selon des processus modernes, sûrs et respectueux de l'environnement, de manière économique et en respectant des normes de qualité sévères.

Avis d'expert et information

Vous trouverez un aperçu de toutes les expertises/textes portant sur la préparation thermosept® NDR sur Internet sous www.schuelke.ch



GEPRÜFTES
UMWELTMANAGEMENT
REG. NR. 01-160-10003



ISO 9001:2015



ISO 13485

Schülke & Mayr GmbH est titulaire d'une autorisation de fabrication selon le paragraphe 13 alinéa 1 de la loi allemande pour les médicaments et les certificats de conformité aux BPF des produits médicaux.

schülke Suisse
Schülke & Mayr AG
Hungerbühlstrasse 22
8500 Frauenfeld
Schweiz
Tel. +41 (0) 44 - 46655 - 44
www.schuelke.ch
mail.ch@schuelke.com

schülke siège principal
Schülke & Mayr GmbH
Robert-Koch-Str. 2
22851 Norderstedt, Allemagne
Tél +49 (0) 40 - 52100 - 0
Fax +49 (0) 40 - 52100 - 318
www.schuelke.com
mail@schuelke.com