

# schülke -†



Distributeur de lingettes humides destinées aux désinfectants schülke pour les surfaces dans tous les domaines relatifs aux hôpitaux, aux maisons de retraite et aux services de secours.

## schülke wipes

### Notre plus

- utilisation polyvalente
- manipulation simple
- tenue de la préparation: allant jusqu'à 28 jours
- ne peluche pas sur la surface
- 40 cioè 100 lingettes de grande dimension (30 x 30 cm) par rouleau
- produit médical

### Domaines d'utilisation

Lingettes destinées à l'imprégnation de désinfectants et de nettoyeurs dédiés.

En fonction des produits sélectionnés, le distributeur de lingettes humides prêtes à l'emploi est destiné en particulier au nettoyage ou à la désinfection de produits médicaux et de surfaces de toutes sortes, notamment dans les domaines exigeants en termes de sécurité relative à l'hygiène.

- schülke wipes 40 (30 x 30 cm)
- schülke wipes 100 (30 x 30 cm)

### Conseils d'utilisation

#### Remplissage initial sous conditions hygiéniques

Nous recommandons, lors du remplissage initial, tout comme pour procéder aux remplissages suivants, le port de gants et la désinfection des surfaces de travail. Ouvrir le couvercle du distributeur de lingettes humides, placer le rouleau déballé. Puis ajouter 3 litres de solution désinfectante prête à l'emploi pour les schülke wipes ou 1,5 litres pour les schülke wipes mini. Pour ces opérations, utiliser les préparations et les concentrations préconisées par nos soins. (Veiller à respecter les notices de préparation correspondantes).

Particulièrement pour les dispositifs médicaux et pour les surfaces sensibles à l'alcool (par ex. coussin, écran, plexiglas et sondes d'échographie) nous vous recommandons d'imprégner les lingettes de notre mikrozyd sensitive liquid.

Tirer la lingette intérieure du rouleau pour la faire passer par l'ouverture en forme d'étoile, dans le couvercle. Après 30 minutes d'attente, les lingettes sont complètement humectées et ainsi prêtes à l'emploi.

Inscrire alors, comme lors de chaque remplissage, le nom de la préparation, la concentration de préparation choisie, la durée d'action et la date de remplissage sur l'étiquette jointe au rouleau de lingette en tissu non tissé. Coller à l'emplacement prévu à cet effet.

CE



# schülke wipes

## Remarques particulières

### Nettoyage et désinfection

En essuyant avec les lingettes humides, veiller à humecter entièrement les surfaces et chaque fois qu'une lingette est prélevée, refermer soigneusement l'ouverture pour éviter un dessèchement des lingettes.

### Remplissage sous conditions hygiéniques

Pour le remplissage du distributeur, procéder comme lors du remplissage initial, selon les indications portées sur le site [www.schuelke-wipes.de](http://www.schuelke-wipes.de)

**Utiliser le désinfectant avec prudence. Avant utilisation, toujours lire l'étiquette et les informations du produit.**

## Comment commander

Article	Bon de livraison	N° art.
schülke wipes 100 ST RO	6/Carton	70003346
schülke wipes mini Feuchttuchsp. 1 ST EM	5/Carton	70003211
schülke wipes Feuchttuchsp. 1 ST EM	5/Carton	70003212
schülke wipes 40 ST RO	10/Carton	70003344
schülke wipes 100 6x100 ST KT	1/Carton	119503
schülke wipes Distr. de lingettes -INT-	1/Carton	119523
schülke wipes mini Distr. de ling. -INT-	1/Carton	119530
schülke wipes 40 10x40 ST KT	1/Carton	119532
schülke wipes Feuchttuchsp.INT 5x 1ST KT	1/Carton	70000162
schülke wipes mini F.Spend.INT 5x 1ST KT	1/Carton	70000163

## Produits associés

- schülke wipes safe&easy

## Informations environnementales

schülke fabrique ses produits selon des procédés modernes, sûrs et respectueux de l'environnement, de manière économique et dans le respect de normes de qualité sévères.

## Avis d'expert et information

Vous trouverez un aperçu de toutes les expertises/données de la littérature disponibles sur la préparation lingettes "schülke wipes" sur notre site Internet [www.schuelke.ch](http://www.schuelke.ch).

Pour vos questions individuelles :

Customer Care

Tél. : +41 44 466 55 44

E-mail : [mail.ch@schuelke.com](mailto:mail.ch@schuelke.com)



Schülke & Mayr GmbH est titulaire d'une autorisation de fabrication selon le paragraphe 13 alinéa 1 de la loi allemande pour les médicaments et les certificats de conformité aux BPF des produits médicaux.

schülke Suisse  
Schülke & Mayr AG  
Hungerbühlstrasse 22  
8500 Frauenfeld  
Schweiz  
Tel. +41 (0) 44 - 46655 - 44  
[www.schuelke.ch](http://www.schuelke.ch)  
[mail.ch@schuelke.com](mailto:mail.ch@schuelke.com)

schülke siège principal  
Schülke & Mayr GmbH  
Robert-Koch-Str. 2  
22851 Norderstedt, Allemagne  
Tél +49 (0) 40 - 52100 - 0  
Fax +49 (0) 40 - 52100 - 318  
[www.schuelke.com](http://www.schuelke.com)  
[mail@schuelke.com](mailto:mail@schuelke.com)