

# schülke -†



Tekutý neutralizační přípravek na bázi kyseliny citronové pro strojový reprocessing zdravotnických prostředků a laboratorního vybavení.

Strojový  
reprocessing  
- neutralizace

## thermosept® NKZ

### Naše Plus

- Bez obsahu fosfátů a tenzidů
- Výborná materiálová kompatibilita
- Prevence proti tvorbě usazenin
- Optimalizuje čistící účinek po neutrálním čištění
- Účinná neutralizace po alkalickém čištění

CE

### Oblast použití

Vhodný pro neutralizaci po alkalickém čištění, během automatického reprocessingu chirurgických, mikrochirurgických a nástrojů, nerezových kontejnerů, rigidních endoskopů, anesteziologického a laboratorního vybavení, operační obuvi a kojeneckých lahví, na zabránění působení alkalických zbytků. Dále je vhodný pro kyselé předčištění nástrojů z nerezové oceli. **thermosept® NKZ** je určen pro použití v mycích dezinfektorech a multi-komorových mycích dezinfektorech.

Používá se k neutralizaci po **thermosept® RKF**, **thermosept® RKN-zym**, **thermosept® alka clean forte**.

### Návod na použití

Dávkování probíhá automaticky pomocí integrovaného dávkovacího zařízení v mycím dezinfektoru. Prosím dodržujte instrukce výrobců zařízení a zdravotnických prostředků.

#### Dávkování:

**Po alkalickém čištění:** 0,1-0,2% (1-2 ml/l)

**Po neutrálním čištění:** 0,1% (1 ml/l)

Pro finální oplach v rámci automatického reprocessingu použijte demineralizovanou vodu.

**Pro kyselé předčištění předmětů odolných vůči působení kyselin:**

0,2 - 0,5% (2 - 5 ml/l) / 40 °C - 60 °C / 30 min.

Po aplikaci je nutný důkladný oplach demineralizovanou vodou.



## Složení

organické kyseliny

### Fyzikálně-chemické vlastnosti

Barva	bezbarvý
Dynamická viskozita	cca. 4 mPa*s / Metoda : ISO 3219
Forma	kapalný
Hustota	cca. 1,17 g/cm <sup>3</sup> / 20 °C
pH	2 / 100 % / 20 °C
Zápalná teplota	Nevztahuje se

## Zvláštní upozornění

Pouze pro profesionální trh. Při manipulaci s koncentrátem použijte osobní ochranné pomůcky - rukavice. Zamezte kontaktu s pokožkou a očima.

Doba expirace: 60 měsíců

## Objednávkové informace

Název produktu	Balení	Číslo výrobku
thermosept NKZ 25 kg KA	1/Kartón	146509
Thermosept NKZ 20 kg	1/Kanistr	146502
Thermosept NKZ 5 kg	1/Kanistr	146503

## Související přípravky

- thermosept® RKF

## Životní prostředí

Společnost Schülke své produkty vyrábí inovativními a bezpečnými postupy šetrnými k životnímu prostředí, hospodárně a za dodržení vysokých standardů kvality.

## Typ přípravku

Zdravotnický prostředek



Společnost Schülke & Mayr GmbH je držitelem oprávnění výrobce podle § 13 odst. 1 německého zákona o léčivých přípravcích a certifikátů o dodržování GMP pro léčivé přípravky.

**Distributor**  
Schulke CZ, s.r.o.  
Lidická 445  
735 81 Bohumín  
Česká republika  
tel.: +420 558 320 260  
www.schulke.cz  
schulkecz@schuelke.com

**Výrobce**  
Schülke & Mayr GmbH  
Robert-Koch-Str. 2  
22851 Norderstedt, Germany  
Phone +49 40 - 52100 - 0  
Fax +49 40 - 52100 - 318  
www.schuelke.com  
info@schuelke.com