



Práškový dezinfekční přípravek na bázi aktivního kyslíku. Vhodný pro dezinfekci a mytí veškerých omyvatelných ploch a povrchů zdravotnických prostředků.

plně virucidní
od 0,5 %

perform®

Naše Plus

- Univerzální použití
- Bez chloru
- Výborné čistící vlastnosti
- Výborná materiálová kompatibilita
- Široké spektrum účinnosti
- Použití i za přítomnosti pacientů
- Nedráždí dýchací cesty
- Plný virucidní účinek

Oblast použití

perform® se používá k dezinfekci a čištění ploch a povrchů zdravotnických prostředků. Je vhodný na veškeré omyvatelné plochy a povrchy. Je vhodný zejména k dezinfekci v místech, kde jsou vysoké nároky na uživatelský komfort a ohleduplnost k životnímu prostředí. perform® vykazuje výbornou materiálovou kompatibilitu i s problematickými materiály jako je např. akrylátové sklo (inkubátory). Přípravek je také vhodný k dezinfekci ochranných a inhalačních dýchacích masek, resuscitačních figurín, otiskovacích hmot atd.

Účinnost

Baktericidní, plně virucidní, mykobaktericidní, tuberkulocidní, fungicidní, sporocidní
Pro získání více informací o mikrobiologické účinnosti a expoziční době kontaktujte zástupce společnosti Schülke.

Návod na použití

Pro přípravu pracovního roztoku rozmícháme příslušné množství přípravku ve vlažné vodě. Plochy a povrchy předmětů otřete syntetickou utěrkou smočenou v pracovním roztoku. Malé voděodolné předměty lze ponořit do pracovního roztoku a po uplynutí doby expozice opláchnout vodou a osušit. Dýchací masky a školící figuríny otřete

syntetickou utěrkou smočenou v roztoku a po době expozice opláchněte vodou / otřete vlhkou textilií. Nepoužitý pracovní roztok je stabilní po dobu 30 hodin.

CE 0297



Složení

100 g přípravku **perform**[®] obsahuje následující aktivní látky:

- 45g monopersíran draselný, sodná sůl

Další složení:

- 5-15% anionaktivní tenzidy
- < 5% neionogenní tenzidy
- < 5% fosfonáty
- < 5% mýdlo

Fyzikálně-chemické vlastnosti

Barva	bílý
Dynamická viskozita	Nevztahuje se
Forma	granulát
pH	cca. 4 / 5 g/l / 20 °C / ve vodě
Zápalná teplota	Nevztahuje se

Zvláštní upozornění

Pouze pro profesionální trh. Při skladování nepřekračujte pokojovou teplotu. Používejte ochranné rukavice (např. z butylkaučuku). Při použití na textilie může mít bělicí účinky. Doba expirace: 24 měsíců

Objednávkové informace

Název produktu	Balení	Číslo výrobku
Perform 900 g, dóza	4/Karton	122322
perform (250x) 40 g BT	250/Karton	70001859
Perform 40g, sáček	1/Karton	122304

Související přípravky

- chirox[®]

Životní prostředí

Společnost Schülke své produkty vyrábí inovativními a bezpečnými postupy šetrnými k životnímu prostředí, hospodárně a za dodržení vysokých standardů kvality.

Typ přípravku

Zdravotnický prostředek



Společnost Schülke & Mayr GmbH je držitelem oprávnění výrobce podle § 13 odst. 1 německého zákona o léčivých přípravcích a certifikátů o dodržování GMP pro léčivé přípravky.

Distributor
Schulke CZ, s.r.o.
Lidická 445
735 81 Bohumín
Česká republika
tel.: +420 558 320 260
www.schulke.cz
schulkecz@schuelke.com

Výrobce
Schülke & Mayr GmbH
Robert-Koch-Str. 2
22851 Norderstedt, Germany
Phone +49 40 - 52100 - 0
Fax +49 40 - 52100 - 318
www.schuelke.com
info@schuelke.com