

schülke →



Koncentrovaný kapalný dezinfekční přípravek na bázi kombinace KAS a aminu, určený pro dezinfekci a mytí ploch a povrchů zdravotnických prostředků.

Na citlivé
povrchy

terralin® protect

Naše Plus

- Bez obsahu aldehydů
- Výborné čisticí vlastnosti
- Použití také ve špatně větratelných místech
- Vhodný k dezinfekci vodolázebných van

Oblast použití

terralin® protect je vhodný pro dezinfekci a čištění ploch a povrchů neinvazivních zdravotnických prostředků ve všech prostorách zdravotnických zařízení (vč. operačních sálů, JIP, neonatalogie). Je vhodný také na citlivé plasty (akryláty, plexi).

Účinnost

Baktericidní, virucidní na BVDV / Vaccinia (HIV/HBV/HCV) / Polyoma SV40 / Noro / Rota, tuberkulocidní, fungicidní
Pro získání více informací o mikrobiologické účinnosti a expoziční době kontaktujte zástupce společnosti Schülke.

Návod na použití

terralin® protect se používá na povrchy předem zbavené viditelného znečištění. K získání požadované koncentrace pracovního roztoku rozmíchejte potřebné množství přípravku ve vlažné vodě. K získání správné koncentrace použijte aplikační pomůcky (odměrky, pumpy, směšovač). Plochy a povrchy předmětů otřete pomocí textilie (mop, utěrka apod.) smočené v pracovním roztoku. Nemíchejte s žádnými jinými čisticími či dezinfekčními přípravky. Není vhodný na finální dezinfekci kritických a semikritických zdravotnických prostředků

CE 0297



Složení

100 g přípravku terralin[®] protect obsahuje následující aktivní látky:

- 22 g Benzalkonium chloride
- 17 g Phenoxyethanol
- 0,9 g Aminoalkylglycine

Další složení:

5-15% neionogenní povrchově aktivní látky, parfém

Fyzikálně-chemické vlastnosti

Barva	zelený
Dynamická viskozita	cca. 21 mPa*s / 20 °C / Metoda : ISO 3219
Forma	kapalný
Hustota	cca. 1,01 g/cm ³ / 20 °C
pH	8,6 / 100 % / 20 °C
Zápalná teplota	48 °C / Metoda : DIN 51755 Part 1



Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.

Zvláštní upozornění

Určeno pro profesionální trh. Mísení s jinými produkty může mít negativní vliv na účinnost produktu. Při používání přípravku doporučujeme nosit rukavice.

Doba expirace: 36 měsíců

Objednávkové informace

Název produktu	Balení	Číslo výrobku
terralin protect RoRsCzHuPtPl 2 l FL	5/Karton	70002784
Terralin protect 2l	5/Karton	181605
Terralin protect 5l	1/Kanistr	181688
terralin protect -PL-CZ-SK- 5 l KA	1/Kanistr	70002786

Související přípravky

- desam[®] effekt

Životní prostředí

Společnost Schülke své produkty vyrábí inovativními a bezpečnými postupy šetrnými k životnímu prostředí, hospodárně a za dodržení vysokých standardů kvality.

Typ přípravku

Zdravotnický prostředek



EMAS
GEPRÜFTES
UMWELTMANAGEMENT
REG.-NR. D-150-10023



Společnost Schülke & Mayr GmbH je držitelem oprávnění výrobce podle § 13 odst. 1 německého zákona o léčivých přípravcích a certifikátů o dodržování GMP pro léčivé přípravky.

Distributor
Schulke CZ, s.r.o.
Lidická 445
735 81 Bohumín
Česká republika
tel.: +420 558 320 260
www.schulke.cz
schulkecz@schuelke.com

Výrobce
Schülke & Mayr GmbH
Robert-Koch-Str. 2
22851 Norderstedt, Germany
Phone +49 40 - 52100 - 0
Fax +49 40 - 52100 - 318
www.schuelke.com
info@schuelke.com