

schülke -†



Na citlivé
povrchy

Dezinfekční utěrky na bázi kvarterních amoniových sloučenin, určené k rychlé dezinfekci povrchů zdravotnických prostředků. Vhodné na dezinfekci povrchů a předmětů materiálů citlivých na alkohol.

mikrozid[®] sensitive wipes

Naše Plus

- Vhodné na citlivé povrchy
- Okamžitě k použití
- Zaručují rychlý dezinfekční efekt - již od 1 minuty
- Pohodlné a snadné použití

CE 0297

Oblast použití

mikrozid[®] sensitive wipes se doporučují k rychlé dezinfekci malých ploch a povrchů zdravotnických prostředků (stoly, stolky, vozíky, kliky, dveře, pomůcky apod.). Obzvláště jsou vhodné pro dezinfekci povrchů citlivých na alkohol. Přípravek je vhodný všude tam, kde je potřeba rychle a zároveň účinně dezinfikovat zdravotnické pomůcky, jako např:

- Povrchy v blízkosti pacientů
- Kontaktní plochy
- Vyšetřovny
- Plastové a akrylátové povrchy
- UZV sondy
- Klávesnice

Účinnost

Baktericidní, levurocidní, virucidní na BVDV / Vaccinia (HIV/ HBV/HCV) / Noro / Rota / Polyoma SV40

Pro získání více informací o mikrobiologické účinnosti a expoziční době kontaktujte zástupce společnosti Schülke.

Návod na použití

mikrozid[®] sensitive wipes se používají na povrchy předem zbažené viditelného znečištění. Vyjměte z dózy potřebný počet ubrousků a otírejte jimi povrchy určené k dezinfekci; dbejte přitom na důkladné smočení povrchů. Kryt dózy uzavřete bezprostředně po vytažení potřebného množství ubrousků. Výrobce garantuje životnost produktu po otevření po dobu 3 měsíců.



mikrozid[®] sensitive wipes

Složení

100 g roztoku mikrozid[®] sensitive wipes obsahuje následující aktivní látky:

- 0,25 g alkyl (C12-16) dimethylbenzyl chlorid amonný (ADBAC/BKC (C12-C16))
- 0,25 g didecyldimethylamoniumchloridu (DDAC)
- 0,25 g alkyl (C12-C14) ethylbenzylamoniumchlorid (ADEBAC (C12-C14))

Fyzikálně-chemické vlastnosti

Barva	bezbarvý
Dynamická viskozita	Údaje nejsou k dispozici
Forma	Vodný obsahující roztok na netkaná textilie
Hustota	cca. 1,00 g/cm ³ / 20 °C / aktivního roztoku
pH	5 - 8 / 100 % / 20 °C / aktivního roztoku
Zápalná teplota	Nevztahuje se

Zvláštní upozornění

Určeno pro profesionální trh. Po použití dózu vždy těsně uzavřete. Chraňte před horkem a slunečním světlem.

Používejte ochranné rukavice.

Doba expirace: 24 měsíců

Objednávkové informace

Název produktu	Balení	Číslo výrobku
mikrozid sensitive wipes prem 100 ST SP	6/Karton	70003108
mikrozid sensitive wipes premium 100 ks	6/Karton	70000807
mikrozid sens wipes Jum Ref 200 ST BT	12/Karton	70001404
mikrozid sens wipes Jum Ref 200 ST BT	12/Karton	70003109
mikrozid sensitive wipes prem 50 ST SP	12/Karton	70003101
mikrozid sensitive wipes premium 50 ks	12/Karton	70000806
Mikrozid sens. w. 200 ks, jumbo dóza	10/Karton	109184
mikrozid sensitive wipes Jumbo 200 ST DS	10/Karton	70003104

Související přípravky

- mikrozid[®] AF wipes
- mikrozid[®] PAA wipes
- mikrozid[®] sensitive liquid
- mikrozid[®] universal wipes

Životní prostředí

Společnost Schülke své produkty vyrábí inovativními a bezpečnými postupy šetrnými k životnímu prostředí, hospodárně a za dodržení vysokých standardů kvality.

Typ přípravku

Zdravotnický prostředek



Společnost Schülke & Mayr GmbH je držitelem oprávnění výrobce podle § 13 odst. 1 německého zákona o léčivých přípravcích a certifikátů o dodržování GMP pro léčivé přípravky.

Distributor
Schülke CZ, s.r.o.
Lidická 445
735 81 Bohumín
Česká republika
tel.: +420 558 320 260
www.schulke.cz
schulkecz@schuelke.com

Výrobce
Schülke & Mayr GmbH
Robert-Koch-Str. 2
22851 Norderstedt, Germany
Phone +49 40 - 52100 - 0
Fax +49 40 - 52100 - 318
www.schuelke.com
info@schuelke.com