

# schülke -†



Přípravek určený k okamžitému použití pro čištění a dezinfekci zdravotnických prostředků.

Na citlivé  
povrchy

## mikrozid<sup>®</sup> sensitive liquid

### Naše Plus

- Šetrně dezinfikuje povrchy zdravotnických prostředků
- Vhodný na citlivé povrchy
- Okamžitě k použití
- Zaručuje rychlý dezinfekční efekt - již od 1 minuty
- Pohodlně a snadno se používá
- Vhodný k dezinfekci špatně dostupných míst

### Oblast použití

**mikrozid<sup>®</sup> sensitive liquid** se doporučuje k rychlé dezinfekci malých ploch a povrchů zdravotnických prostředků (stoly, stolky, vozíky, kliky, dveře, pomůcky apod.). Obzvláště vhodný pro dezinfekci povrchů citlivých na alkohol. Přípravek je vhodný všude tam, kde je potřeba rychle a zároveň účinně dezinfikovat zdravotnické pomůcky, jako např:

- Povrchy v blízkosti pacientů
- Kontaktní plochy
- Vyšetřovny
- Plastové a akrylátové povrchy
- UZV sondy
- Klávesnice

### Účinnost

Baktericidní, levurocidní, virucidní na BVDV/ Vaccinia (HIV/ HBV/ HCV) / Noro / Rota / Polyoma.

Pro získání více informací o mikrobiologické účinnosti a expoziční době kontaktujte zástupce společnosti Schülke.

### Návod na použití

**mikrozid<sup>®</sup> sensitive liquid** aplikujte neředěný na povrch, rozeřete utěrkou a nechte působit. Dodržte expoziční čas. Zabezpečte důkladné smočení povrchu. Produkt není určen

k finální dezinfekci kritických a semikritických zdravotnických prostředků.

CE 0297



# mikrozid<sup>®</sup> sensitive liquid

## Složení

100 g roztoku mikrozid<sup>®</sup> sensitive liquid obsahuje následující aktivní látky:

- 0,25 g alkyl (C12-16) dimethylbenzyl chlorid amonný (ADBAC/BKC (C12-C16))
- 0,25 g didecyldimethylamoniumchloridu (DDAC)
- 0,25 g alkyl (C12-C14) ethylbenzylamoniumchlorid (ADEBAC (C12-C14))

## Fyzikálně-chemické vlastnosti

Barva	bezbarvý
Dynamická viskozita	nestanoveno
Forma	kapalný
Hustota	cca. 1,00 g/cm <sup>3</sup> / 20 °C
pH	5 - 8 / 100 % / 20 °C
Zápalná teplota	Nevztahuje se

## Zvláštní upozornění

Určeno pro profesionální trh. Jakékoli vážné incidenty související s přípravkem je třeba hlásit výrobci a příslušnému úřadu.

Doba expirace: 60 měsíců

## Objednávkové informace

Název produktu	Balení	Číslo výrobku
mikrozid sensitive liquid 500 ml FL	20/Karton	70003134
mikrozid sensitive liquid 1 l FL	10/Karton	70003135
mikrozid sensitive liquid 5 l KA	1/Kanistr	70003136

## Související přípravky

- mikrozid<sup>®</sup> AF liquid
- mikrozid<sup>®</sup> sensitive wipes

## Životní prostředí

Společnost Schülke své produkty vyrábí inovativními a bezpečnými postupy šetrnými k životnímu prostředí, hospodárně a za dodržení vysokých standardů kvality.

## Typ přípravku

Zdravotnický prostředek



Společnost Schülke & Mayr GmbH je držitelem oprávnění výrobce podle § 13 odst. 1 německého zákona o léčivých přípravcích a certifikátů o dodržování GMP pro léčivé přípravky.

Distributor  
Schulke CZ, s.r.o.  
Lidická 445  
735 81 Bohumín  
Česká republika  
tel.: +420 558 320 260  
www.schulke.cz  
schulkecz@schuelke.com

Výrobce  
Schülke & Mayr GmbH  
Robert-Koch-Str. 2  
22851 Norderstedt, Germany  
Phone +49 40 - 52100 - 0  
Fax +49 40 - 52100 - 318  
www.schuelke.com  
info@schuelke.com