



Tekutý koncentrát na bázi kyseliny peroctové pro chemotermický reprocessing endoskopů v automatických myčkách

& thermosept®
PAA aditivum

thermosept® PAA base

Naše Plus

- Široké spektrum účinnosti včetně spór C. Difficile
- Výborná materiálová kompatibilita
- Krátký expoziční čas
- Účinný již při nízkých teplotách

Oblast použití

Vhodný pro chemotermický reprocessing flexibilních endoskopů v automatických myčkách. **thermosept®PAA báze** a **thermosept®PAA aditivum** lze použít pouze ve vzájemné kombinaci. Kompatibilní s čisticím prostředkem **thermosept®ER** nebo **thermosept®X-tra**. Možnost použití přípravku na endoskopy všech předních výrobců: Fujinon, Olympus, Karl Storz, Richard Wolf

Účinnost

Baktericidní, tuberkulocidní, fungicidní, virucidní (Adeno, Polio, Noro), sporicidní (včetně Clostridium difficile)
Pro získání více informací o mikrobiologické účinnosti a expoziční době kontaktujte zástupce společnosti Schülke.

Návod na použití

Dvousložkový dezinfekční prostředek. Vždy používejte **thermosept® PAA báze** a **thermosept® PAA aditivum** současně. Nejlepší účinnosti dosahuje při koncentraci 1% - 1,2% **thermosept® PAA báze** a 1% - 1,2% **thermosept® PAA aditivum** do 5ti minut.

Doporučené použití:

Předmytí vodou - mytí přípravkem **thermosept®ER** (5ml/l) - mezioplach - dezinfekce 5 minut při 35°C - 37°C (aditiv společně splněním komory vodou a následně báze) - oplach - závěrečný oplach



thermosept® PAA base

Složení

100 g přípravku thermosept® PAA báze obsahuje - 5g kyseliny peroctové

- Další látky: peroxid vodíku, kyselina octová

thermosept® PAA aditivum - hydroxid draselný, fosfáty, inhibitor koroze



Fyzikálně-chemické vlastnosti

Barva	bezbarvý
Dynamická viskozita	Data neudána
Forma	kapalný
Hustota	1,1 g/cm ³ / 20 °C
pH	< 1 / 20 °C / koncentrát
Zápalná teplota	Nevztahuje se

Zvláštní upozornění

Přípravky je možné použít pouze v kombinaci. Uchovávejte v originálních, těsně uzavřených obalech, při pokojové teplotě. Chraňte před teplem a přímým slunečním světlem.

thermosept® PAA není vhodný na přístroje vyrobené z mosazi, mědi nebo chromu. V souladu s normou EN 17664 by měly být před prvním použitím přečteny pokyny pro používání přístrojů. Pokud si nejste jistí materiálovou kompatibilitou přístroje, vždy raději kontaktujte výrobce. Dodržujte instrukce výrobců zařízení a zdravotnických prostředků.

Doba expirace:

thermosept® PAA báze- 18 měsíců

thermosept® PAA aditivum - 24 měsíců

Objednávkové informace

Název produktu	Balení	Číslo výrobku
Thermosept PAA báze	2/Karton	125702
thermosept PAA base Test 4 I KA	1/Kartón	70002721

Související přípravky

- thermosept® ER
- thermosept® PAA additive
- thermosept® X-tra

Životní prostředí

Společnost Schülke své produkty vyrábí inovativními a bezpečnými postupy šetrnými k životnímu prostředí, hospodárně a za dodržení vysokých standardů kvality.

Typ přípravku

Zdravotnický prostředek třídy IIb



Společnost Schülke & Mayr GmbH je držitelem oprávnění výrobce podle § 13 odst. 1 německého zákona o léčivých přípravcích a certifikátů o dodržování GMP pro léčivé přípravky.

Distributor
Schulke CZ, s.r.o.
Lidická 445
735 81 Bohumín
Česká republika
tel.: +420 558 320 260
www.schulke.cz
schulkecz@schuelke.com

Výrobce
Bioxal SA
Route des Verennes 71100
Chalon Sur Saone
Francie