



Nízkoalkoholová, rychlá dezinfekce neinvazivních zdravotnických prostředků a povrchů.

Univerzální
dezinfekce

mikrozid® universal liquid

Naše Plus

- vhodný k dezinfekci citlivých povrchů komunikačních zařízení
- dermatologicky testován
- k okamžitému použití

CE 0297

Oblast použití

Výrobek je vhodný k dezinfekci zdravotnických prostředků a ostatních povrchů. Náš univerzální a rychlý dezinfekční prostředek je také vhodný k dezinfekci citlivých komunikačních zařízení.

Chytré telefony a tablety patří mezi nejběžnější dotykové kontaktní plochy. S přípravkem **mikrozid® universal liquid** mohou být bezpečně ošetřeny bez poškození materiálů.

Účinnost

Baktericidní, omezeně virucidní, levurocidní, tuberkulocidní
Pro více informací o biocidní účinnosti produktu kontaktujte zaměstnance Schulke CZ

Návod na použití

Naneste neředěný přípravek na povrch, rozetřete a nechte působit. Zajistěte úplné zvlhčení a udržujte povrch vlhký po celou dobu expozice. Zajistěte, aby všechny viditelné nečistoty byly odstraněny před dezinfekcí. Postříkejte povrch z dálky cca. 30 cm (přibližně 40 ml/m²) a nechte uschnout. Pro účinnost na adenovirus a Mycobacterium tuberculosis, udržujte povrch mokry po celou dobu expozice. Pouze pro profesionální použití. Jakékoli závažné incidenty související s produktem mají být oznámeny výrobcí a příslušnému orgánu. Přípravek není určen pro finální dezinfekci semikritických a kritických zdravotnických prostředků! Přípravek může být použit bez rukavic v závislosti od epidemiologické situace a bezpečnosti práce.



mikrozid® universal liquid

Složení

100 g roztoku obsahuje následující aktivní látky: 17,4 g Propan-2-ol, 12,6 g Ethanol (94 % w/w)
Označení podle nařízení o shodě (EC) No. 648/2004: < 5% aniontové povrchově aktivní látky

Fyzikálně-chemické vlastnosti

Barva	bezbarvý
Dynamická viskozita	nestanoveno
Forma	kapalný
Hustota	cca. 0,95 g/cm ³
pH	cca. 3,5 / 100 %
Zápalná teplota	26 °C / Metoda: DIN 51755 Part 1

Zvláštní upozornění

Používejte dezinfekční prostředky bezpečně. Vždy si přečtěte etiketu a informaci o produktu před použitím. Výrobek má velmi dobrou materiálovou kompatibilitu s kovy a plasty. Chraňte před teplem a zdroji vznícení. Další informace jsou k dispozici na vyžádání. Dobu použitelnosti otevřeného balení naleznete na obalu. Přípravek může být použit bez rukavic v závislosti od epidemiologické situace a bezpečnosti práce. Doba expirace: 36 měsíců

Objednávkové informace

Název produktu	Balení	Číslo výrobku
mikrozid universal liquid Rfl 1 I FL	10/Karton	70000998

Životní prostředí

Společnost Schülke své produkty vyrábí inovativními a bezpečnými postupy šetrnými k životnímu prostředí, hospodárně a za dodržení vysokých standardů kvality.

Typ přípravku

Zdravotnický prostředek, Biocid



Společnost Schülke & Mayr GmbH je držitelem oprávnění výrobce podle § 13 odst. 1 německého zákona o léčivých přípravcích a certifikátů o dodržování GMP pro léčivé přípravky.

Distributor
Schulke CZ, s.r.o.
Lidická 445
735 81 Bohumín
Česká republika
tel.: +420 558 320 260
www.schulke.cz
schulkecz@schuelke.com

Výrobce
Schülke & Mayr GmbH
Robert-Koch-Str. 2
22851 Norderstedt, Germany
Phone +49 40 - 52100 - 0
Fax +49 40 - 52100 - 318
www.schuelke.com
info@schuelke.com