



Liquide de rinçage pour le traitement en machine des instruments médicaux et des accessoires.

## thermodent® clear

### Notre plus

- Garantit un séchage rapide et sans tâche
- Evite la formation de résidus
- Economique : 3 ml par cycle (soit 333 cycles)
- Compatible avec les machines Miele

### Domaines d'utilisation

thermodent® clear est un liquide de rinçage qui protège les instruments en garantissant un séchage rapide évitant ainsi la formation de résidus.

### Propriétés des produits

Pour un résultat optimal lors de la phase de rinçage, il convient d'utiliser thermodent® clear pendant la dernière étape du programme.

Pour cela, vérifiez régulièrement l'indicateur de niveau de produit de rinçage dans la porte du thermo-désinfecteur. thermodent® clear s'utilise à une concentration de 0,02 - 0,6 %.

Il est dosé automatiquement grâce au doseur intégré dans la machine (en fonction de la dureté de l'eau).

Dans tous les cas, vous devez vous conformer au mode d'emploi de votre thermo-désinfecteur.

N'oubliez pas de prendre en compte les messages concernant le niveau de remplissage de vos produits de nettoyage.

### Conseils d'utilisation

- Prélaver les instruments à l'eau froide pour enlever les souillures et les résidus
- Nettoyer avec thermodent® alka clean ou thermodent® powder (à environ 55°C)
- Neutraliser avec thermodent® neutralizer
- Rincer

- Pendant la phase de désinfection (à 93°C / 5 min) utiliser le thermodent® clear pour un meilleur résultat de rinçage (dosage : 0,01 à 0,03% soit 0,1 à 0,3 mL par litre d'eau)
- Sécher

En cas de doutes, se référer aux recommandations d'utilisation du fabricant du thermo-désinfecteur



## Données relatives au produit

### Composition :

5 - 15 % agents tensioactifs non ioniques, anti corrosifs, solubilisateur, alcool.

### Données physico-chimiques

Couleur	incolore
Densité	env. 0,99 g/cm <sup>3</sup> / 20 °C
pH	7 / 100 % / 20 °C
Point d'éclair	37 °C / Méthode : DIN 51755 Part 1
Routine FORM	liquide
Viscosité dynamique	Donnée non disponible

## Remarques particulières

Utilisez les DM avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

## Comment commander

Article	Bon de livraison	N° art.
thermodent clear 1 l FL	10/Carton	143101

## Informations environnementales

schülke est une société engagée dans une gestion durable et responsable de nos ressources naturelles, de notre environnement et de notre santé. Notre système de management environnemental lancé en 1996 conditionne toutes nos activités au quotidien, et nos efforts sont régulièrement récompensés par les instances environnementales allemandes et internationales (EMAS, ECO AUDIT et Responsible Care).

## Avis d'expert et information

Les documents relatifs au produit sont disponibles sur simple demande à l'adresse suivante : [schuelkefrance.info@schuelke.com](mailto:schuelkefrance.info@schuelke.com)  
Ou auprès de votre contact commercial personnalisé.  
Retrouvez toutes les nouveautés et informations diverses sur notre site internet : [www.schuelke.fr](http://www.schuelke.fr)

thermodent<sup>®</sup> clear est un dispositif médical de classe I.  
Marquage CE.  
thermodent<sup>®</sup> clear est fabriqué par Schülke & Mayr GmbH  
(Robert-Koch Str 2 | 22851 Norderstedt | Allemagne)



Schülke & Mayr GmbH est titulaire d'une autorisation de fabrication selon le paragraphe 13 alinéa 1 de la loi allemande pour les médicaments et les certificats de conformité aux BPF des produits médicaux.

Schülke France  
Schülke France SARL  
Route de Varennes  
71100 Chalons-sur-Saône  
France  
Tél +33 3 85 92 30 00  
[www.schuelke.fr](http://www.schuelke.fr)  
[schuelkefrance.info@schuelke.com](mailto:schuelkefrance.info@schuelke.com)

Siège  
Schülke & Mayr GmbH  
Robert-Koch-Str. 2  
22851 Norderstedt, Allemagne  
Tél +49 40 - 52100 - 0  
Fax +49 40 - 52100 - 318  
[www.schuelke.com](http://www.schuelke.com)  
[info@schuelke.com](mailto:info@schuelke.com)