



Lingettes à faible teneur en alcool pour la désinfection de dispositifs médicaux non-invasifs et tout type de surfaces.

mikrozid® universal wipes green line

Notre plus

- Lingettes 100% sans plastique
- Multiple durabilité et neutralité climatique
- Très bonne compatibilité avec les matériaux
- Efficacité rapide et complète
- Dermatologiquement testé

Domaines d'utilisation

Le produit convient pour la désinfection de dispositifs médicaux et autres surfaces. Polyvalent pour une désinfection rapide. Convient également pour la désinfection des appareils de communication sensibles (smartphones, tablettes). Avec mikrozid® universal *green line* il est possible de désinfecter les surfaces en toute sécurité sans endommager les matériaux.

Efficacité microbiologique

Efficacité	Solution	Temps d'action
Bactéries Selon les recommandations VAH temps de contact court - en conditions de propreté	prêtes à l'emploi	1 min
Bactéries EN13727 - en conditions de saleté	prêtes à l'emploi	15 sec
Bactéries EN16615 - en conditions de propreté	prêtes à l'emploi	1 min
Bacille de la Tuberculose EN14348 - en conditions de propreté	prêtes à l'emploi	5 min
Levure EN16615 - en conditions de propreté	prêtes à l'emploi	1 min

Efficacité	Solution	Temps d'action
Levure EN13624 - en conditions de saleté	prêtes à l'emploi	1 min
Levure Conformément à la VAH - en conditions de propreté	prêtes à l'emploi	1 min
activité virucide limitée EN14476 - en conditions de saleté	prêtes à l'emploi	15 sec
activité virucide limitée PLUS EN14476 - en conditions de saleté	prêtes à l'emploi	15 min
norovirus EN14476 - en conditions de saleté	prêtes à l'emploi	60 sec
norovirus EN14476 - en conditions de propreté	prêtes à l'emploi	30 sec
polyomavirus SV 40 conformément à la directive de la DVV (Association allemande de lutte contre les maladies virales, association déclarée) / RKI	prêtes à l'emploi	15 sec
rotavirus EN14476 - en conditions de propreté	prêtes à l'emploi	15 sec



mikrozid® universal wipes green line

Données relatives au produit

Composition:

100 g de solution contiennent les substances actives: 17,4 g propan-2-ol, 12,6 g éthanol (94 % w/w) Désignation conforme à l'ordonnance (CE) N°648/2004: <5% agents tensioactifs anioniques

Remarques particulières

Le produit est extrêmement compatible avec les métaux et les matières plastiques. Veuillez tenir compte de la protection contre les incendies & les explosions lors de l'utilisation de désinfectants à base d'alcool. S'éloigner de tenir à l'écart de la chaleur et des sources d'inflammation. Des indications supplémentaires sont disponibles sur demande. schülke garantit une conservation de 1 mois après l'ouverture de l'emballage.

Disponible en dimension: mikrozid® universal wipes *green line* (6 x 114 lingettes 18 x 20 cm). Couvrance par lingette*: ca. 1,0 m²

* La couvrance par lingette dépend des conditions environnementales et de la structure de la surface essuyée.

Conseils d'utilisation

Essuyer la surface avec la lingette imbibée et laisser agir. Veiller à un mouillage complet. S'assurer que toutes les salissures visibles sont enlevées avant la désinfection. Traiter que des petites surfaces. Respecter les critères d'hygiène lors de l'ouverture du softpack. Après l'utilisation, veiller à bien refermer le couvercle. En cas de virus Adeno et Mycobacterium tuberculosis, maintenir la surface humide pendant toute la durée d'action. Les incidents graves liés au produit doivent être signalés au fabricant et à l'autorité compétente. Ne convient pas à la désinfection de dispositifs médicaux invasifs! Le produit peut s'utiliser sans gants, dans la mesure où la protection du travail et la lutte contre les infections le permettent.

Comment commander

Article	Bon de livraison	N° art.
mikrozid univ wipes green maxi 90 ST SP	6/Carton	70003664
mikrozid univ wipes green line 114 ST SP	6/Carton	70003354

Informations environnementales

schülke fabrique ses produits selon des procédés avancés, sécurisés et respectueux de l'environnement, de manière économique et dans le respect des standards élevés de qualité.

Avis d'expert et information

Les documents relatifs au produit sont disponibles sur simple demande à l'adresse suivante : schuelkefrance.info@schuelke.com
Ou auprès de votre contact commercial dédié.
Retrouvez toutes les nouveautés et informations diverses sur notre site internet : www.schuelke.fr

mikrozid® universal wipes green line est un dispositif médical de classe IIa fabriqué par Schülke & Mayr GmbH et marqué CE 0297. Lire attentivement la notice.
mikrozid® universal wipes green line est un produit biocide pour utilisations TP2 et TP4. Utiliser les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lire l'étiquette et les informations concernant le produit.



Schülke & Mayr GmbH est titulaire d'une autorisation de fabrication selon le paragraphe 13 alinéa 1 de la loi allemande pour les médicaments et les certificats de conformité aux BPF des produits médicaux.

Schülke France
Schülke France SARL
Route de Varennes
71100 Chalons-sur-Saône
France
Tél +33 3 85 92 30 00
www.schuelke.fr
schuelkefrance.info@schuelke.com

Siège
Schülke & Mayr GmbH
Robert-Koch-Str. 2
22851 Norderstedt, Allemagne
Tél +49 40 - 52100 - 0
Fax +49 40 - 52100 - 318
www.schuelke.com
info@schuelke.com