

schülke -+



Innowacyjny system chusteczek przeznaczonych do nasączenia środkami dezynfekcyjnymi firmy schülke

schülke wipes safe&easy

Zalety

- najwyższy poziom higieny
- do obszarów o wysokim ryzyku kontaminacji
- łatwe w użyciu
- po zalaniu do wykorzystania w ciągu 28 dni
- nie pozostawiają smug
- gramatura 50 g/cm³
- wykonane z poliestru
- dostępne w ilości 111 szt. chusteczek (30x24cm) w jednorazowych workach lub 130 szt. chusteczek w jednorazowym wiaderku (30x19cm)

Obszary zastosowania

Chusteczki safe&easy są bezpieczne i proste w użyciu. Chusteczki przeznaczone są do mycia i dezynfekcji powierzchni lub wyrobów medycznych, w zależności od środka użytego do nasączenia chusteczek (produkt biobójczy lub wyrób medyczny). Ze względu na bezpieczne i łatwe w użyciu są idealnym rozwiązaniem dla obszarów o szczególnie bardzo wysokim ryzyku nabycia infekcji np.: w izolatkach, salach operacyjnych.

Wskazówki dotyczące stosowania

Chusteczki safe&easy:

- system bag-in-box - chusteczki pakowane w jednorazowe worki zabezpieczające przed kontaminacją dozownika. Napełnić pojemnik 3 litrami roztworu roboczego środka dezynfekcyjnego. Chusteczki po odczekaniu 30 minut są całkowicie nasączone i gotowe do użycia. Wypełnić etykietę, która jest dołączona do opakowania chusteczek i nakleić na pojemniku. Zmieniać etykietę przy każdym ponownym napełnianiu systemu.
- system bagless - gotowy, jednorazowy system do nasączenia. Chusteczki gotowe do nasączenia znajdują się w pojemniku, który zabezpiecza je przed kontaminacją.

Napełnić pojemnik 2,5 litrami roztworu roboczego środka dezynfekcyjnego.

Chusteczki po odczekaniu 30 minut są całkowicie nasączone i gotowe do użycia. Wypełnić etykietę znajdującą się na opakowaniu.

Przy nasączeniu chusteczek zalecane jest stosowanie rękawic ochronnych oraz zdezynfekowanie blatów roboczych.



schulke wipes safe&easy

Wskazówki szczególne

Używając nasączanych chusteczek należy zwrócić uwagę aby dezynfekowane powierzchnie pozostawały zwilżone przez wymagany czas. Po użyciu należy szczelnie zamknąć opakowanie, aby zapobiec wysychaniu chusteczek.

Pojemniki użyte w systemie bag-in-box mogą być myte i dezynfekowane w temp. do 70°C (również w myjniach dezynfektorach).

Informacje dotyczące zamówienia

Artykuł	Forma dostawy	Art.-Nr.
schulke wipes s&e bagless 130 ST EM	6/Karton	70003177
schulke wipes safe+easy 111 ST RO	6/Karton	70003349
schulke wipes safe+easy Sp.box 1 ST EM	10/Karton	70003213
schulke wipes safe&easy dozow. 1x10ST KT	1/Karton	119542
schulke wipes safe&easy 6x111ST KT	1/Karton	119544
schulke wipes bagless system 6x130 ST KT	1/Karton	70000034



Schulke & Mayr GmbH posiada pozwolenie na wytwarzanie produktów leczniczych zgodnie z §13 ustawy o produktach leczniczych oraz posiada certyfikat GMP.

Dystrybutor
Schulke Polska Sp. z o. o.
Al. Jerozolimskie 132
02-305 Warszawa, Polska
Telefon +48 0 22 11-60-700
Telefax +48 0 22 11-60-701
www.schulke.pl
schulke.polska@schuelke.pl

Wytwórca
Schülke & Mayr GmbH
Robert-Koch-Str. 2
22851 Norderstedt, Niemcy
Telefon +49 40 - 52100 - 0
+49 40 - 52100 - 318
www.schuelke.com
info@schuelke.com