

schülke →



Dezinfekčný prípravok určený na okamžité čistenie a dezinfekciu rotačných nástrojov

K okamžitému
použitiu

rotasept®

Naše Plus

- Všestranne účinný
- Virucidny do 1 min
- Veľmi vhodný na použitie pre ultrasonické umývačky
- Bez aldehydov
- K okamžitému použitiu

Oblasti použitia

K manuálnemu čisteniu a dezinfekcii vrátokv, rezných nástrojov, diamantových brúsok a ďalších rotačných nástrojov. Vďaka výbornej materiállovej kompatibilite a komplexnej účinnosti je **rotasept®** vhodný pre dezinfekciu rotačných nástrojov

Účinnosť

Baktericídny, mykobakteriocídny, levurocídny, virucidny. Pre získanie viac informácií o mikrobiologickej účinnosti a expozičnej dobe kontaktujte zástupcu spoločnosti Schülke.

Návod na použitie

rotasept® je tekutý prípravok na priame použitie bez nutnosti riedenia pre dezinfekciu rotačných nástrojov ponorením. Vložte každý malý rotačný nástroj do roztoku ihneď po jeho použití. Vyvarujete sa tak zaschnutí nečistôt na povrchu nástroja. Aby sme predišli nožnej korózii, nástroje po použití **rotasept®** neoplachujte vodou. Za použitia pinzety nástroja položte na tkaninu z buničiny a nechajte vyschnúť. Pokiaľ je potrebné manuálne očistite zvyšné nečistoty na nástroji a proces zopakujte. Ak sú nástroje určené na sterilizáciu, zvyšky **rotasept®** opláchnite pitnou vodou a dôkladne osušte. Čas ponoru: 15 minút. Neprekračujte odporúčanú dobu expozície. Pracovný roztok sa pripravuje čerstvý každý pracovný deň. V prípade, že je viditeľná kontaminácia roztoku, vymeňte okamžite. Nemiešajte s inými čistiacimi prípravkami, či dezinfekciou. Pri čistení a dezinfekcii

rotačného inštrumentária aj nástrojov postupujte podľa odporúčania výrobcu nástroja. Nepoužívajte na nástroje vyrobené z plastov citlivých na zásadité, či alkoholovej roztoky, hliníkové súčiastky a nástroje, ktoré boli vytvorené za pomoci syntetických lepidiel. Na tieto produkty odporúčame produkt **gigasept® Instru AF**. **rotasept®** je veľmi vhodný na použitie v ultrazvukových kúpeľoch

CE 0297



Zloženie

100 g rotasept®u obsahuje: 1.6 g Hydroxid draselný, 10.0 g, Propán-2-ol, 0.1 g 2-Ethylhexanol.

Ďalšie zložky: <5% neionogénne tenzidy

Fyzikálno-chemické vlastnosti

Bod vzplanutia	36 °C / Metóda : DIN 51755 Part 1
Farba	bezfarebný
Forma	kvapalina
Hustota	cca. 1,00 g/cm ³ / 20 °C
pH	13,7/ 100 % / 20 °C

Zvláštne upozornenia

Len pre profesionálny trh. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a návod na použitie. Skladujte pri izbovej teplote. Nemiešajte s inými produktmi alebo detergenty. Nepoužívajte po uplynutí času
Expiračná doba: 36 mesiacov

Objednávkové informácie

Názov produktu	Balenie	Číslo výrobku
Rotasept 2 l	5/Kartón	104743

Životné prostredie

Spoločnosť Schülke svoje produkty vyrába inovatívnymi a bezpečnými postupmi šetrnými k životnému prostrediu, hospodárne a za dodržanie vysokých štandardů kvality.

Typ prípravku

Zdravotnícky prostriedok triedy IIb



EMAS
GEPRÜFTES
UMWELTMANAGEMENT
REG. NR. D-150-10023



Spoločnosť Schülke & Mayr GmbH je držiteľom povolenia pre výrobu liečiv podľa § 13 ods. 1 zákona o liekoch a držiteľom certifikátov GMP pre lieky.

Distribútor
Schulke SK, s.r.o.
Moštenická 3
971 01 Prievidza
Slovenská republika
tel.: +421 465 494 587
www.schulke.sk
schulkesk@schuelke.com

Výrobca
Schülke & Mayr GmbH
Robert-Koch-Str. 2
22851 Norderstedt, Germany
Phone +49 40 - 52100 - 0
Fax +49 40 - 52100 - 318
www.schuelke.com
info@schuelke.com