

schülke -†



Tekutý neutrálny prípravok na čistenie flexibilných endoskopov k chemoterickému reprocessingu

Výborný
čistiaci účinok

thermosept® ER

Naše Plus

- vhodné pre flexibilné endoskopy a lekárske instrumentárium
- pH neutrálny s vynikajúcou materiálovou kompatibilitou
- obsahuje enzýmy na podporu čistenia nečistôt s obsahom bielkovín

Oblasti použitia

thermosept® ER je tekutý čistiaci prostriedok vo forme koncentráту vhodný pre chemoterický reprocessing flexibilných endoskopov aj endoskopických prístrojov, ako napr. fibroskopy v kombinácii s **thermoseptem® ED** alebo **thermoseptem® PAA**. Použitie je možné vo všetkých dostupných automatických umývačkách Belimed, BHT, Getinge, Olympus, Steelco, Steris and Wassenburg

Návod na použitie

Dávkovanie:

• 0,4 - 0,6% (4-6 ml / l), 5 - 10 min, pri teplote 30- 55 ° C
Flexibilné endoskopy a ďalšie endoskopická zariadenia možno následne dezinfikovať pomocou produktu **thermosept® PAA**, prípadne produktom **thermosept® ED**. Všetky produkty obsahujú inhibítory tvorby peny a umožňujú výber medzi teplou alebo studenou vodou v akejkoľvek fáze programového cyklu. Odporúčame použitie demineralizovanej vody. Koncentrácia, doba čistenia a teplota sú závislé na miere znečistenia nástrojov. Dávkovanie sa vykonáva automaticky podľa nastavenia integrovaného dávkovacieho čerpadla v umývacom automate alebo dezinfektore. Vždy dodržujte inštrukcie výrobcov zariadení a zdravotníckych pomôcok.

CE



Zloženie

5 - 15% neionogénnych povrchovo aktívnych látok, enzýmy

Ďalšie zložky: rozpúšťadlá, korózne inhibítory,

Alkylpolyethylen-glycol-polybutylén-glycolether

Fyzikálno-chemické vlastnosti

Bod vzplanutia	45 °C / Metóda : DIN 51755 Part 1
Farba	svetložltý
Forma	kvapalina
Hustota	cca. 1,01 g/cm ³ / 20 °C
pH	6 - 7,5 / 100 % / 20 °C

Zvláštne upozornenia

Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o produkte. Len na profesionálne použitie. Akékoľvek vážne udalosti súvisiace s produktom je potrebné hlásiť výrobcovi a príslušnému orgánu. Dbajte na odporúčania výrobcov strojov a prístrojov. Nádobu uchovávajte tesne uzavretú. Chráňte pred mrazom, teplom a slnečným žiarením. Skladujte pri izbovej teplote v pôvodnom obale.

Objednávkové informácie

Názov produktu	Balenie	Číslo výrobku
Thermosept er čistiaci enzým 5 l	1/Kanister	189901
thermosept ER 5 l KA	1/Kanister	70003422

Životné prostredie

Spoločnosť Schülke svoje produkty vyrába inovatívnymi a bezpečnými postupmi šetrnými k životnému prostrediu, hospodárne a za dodržanie vysokých štandardov kvality.

Typ prípravku

Zdravotnícky prípravok triedy I.



Spoločnosť Schülke & Mayr GmbH je držiteľom povolenia pre výrobu liečiv podľa § 13 ods. 1 zákona o liekoch a držiteľom certifikátov GMP pre lieky.

Distribútor
Schulke SK, s.r.o.
Moštenická 3
971 01 Prievidza
Slovenská republika
tel.: +421 465 494 587
www.schulke.sk
schulkesk@schuelke.com

Výrobca
Schülke & Mayr GmbH
Robert-Koch-Str. 2
22851 Norderstedt, Germany
Phone +49 40 - 52100 - 0
Fax +49 40 - 52100 - 318
www.schuelke.com
info@schuelke.com