

# schülke →



Kyslý koncentrovaný zmäkčovač vody bez obsahu tenzidu, určený pre umývanie a chemoterický reprocessing podložných mís a močových fliaš.

Odstraňuje  
vodný kameň

## thermosept® SKS

### Naše Plus

- Odstraňuje nánosy vodného kameňa a zabraňuje jeho opätovnému vzniku
- Nepenívý a biologicky odbúrateľný
- Po zaschnutí nezanecháva škvrny
- Výborná materiálová kompatibilita s nerezom, hliníkom aj plastami

### Oblasti použitia

Tekutý koncentrovaný prípravok **thermosept® SKS** je vhodný na chemoterický reprocessing podložných mís a močových fliaš. Výrobok je vhodný pre všetky úrovne tvrdosti vody. Prevencia zanášania vodným kameňom. Tiež predchádza kalcifikácii v parných sterilizátoroch a zvyšuje čistiacu účinnosť.

### Návod na použitie

0,01% na 1 ° dH (zodpovedá tvrdosti vody 0,18 mmol / l), čo zodpovedá dávke 0,1 až 0,3% (1 - 3 ml / l vody). Dávkovanie sa vykonáva automaticky podľa nastavenia integrovaného dávkovacieho čerpadla v umývacom automate alebo dezinfektore. V prípade, že je na vykurovacom telese veľké množstvo vápenatých usadenín, odporúčame pred použitím **thermosept® SKS** vykonať odvápnenie. **thermosept® SKS** zabraňuje vzniku vodného kameňa v parnom generátore aj pri použití s tvrdej vody. Aby sa zabránilo tvorbe vodného kameňa, mala by sa vokonávať pravidelná údržba. Pred použitím sa uistite, či je dávkovacie čerpadlo odolné proti kyselinám. Vždy dodržujte inštrukcie výrobcov zariadení a zdravotníckych pomôcok.

CE



## Zloženie

Zmäkčovač, inhibítor korózie, organické kyseliny

### Fyzikálno-chemické vlastnosti

Bod vzplanutia	> 100 °C
Dynamická viskozita	Údaje sú nedostupné
Farba	bezfarebný
Forma	kvapalina
Hustota	cca. 1,08 g/cm <sup>3</sup> / 20 °C
pH	1,3 / 100 % / 20 °C

## Zvláštne upozornenia

Uchovávajte nádobu tesne uzavretú. Skladujte pri izbovej teplote v originálnom obale.

Doba expirácia: 36 mesiacov

## Objednávkové informácie

Názov produktu	Balenie	Číslo výrobku
Thermosept SKS SOKA 5 l	1/Kanister	145803
Thermosept SKS 5 l	1/Kanister	145806

## Životné prostredie

Spoločnosť Schülke svoje produkty vyrába inovatívnymi a bezpečnými postupmi šetrnými k životnému prostrediu, hospodárne a za dodržanie vysokých štandardov kvality.

## Typ prípravku

Zdravotnícky prostriedok triedy I



Spoločnosť Schülke & Mayr GmbH je držiteľom povolenia pre výrobu liečiv podľa § 13 ods. 1 zákona o liekoch a držiteľom certifikátov GMP pre lieky.

**Distribútor**  
Schulke SK, s.r.o.  
Moštenická 3  
971 01 Prievidza  
Slovenská republika  
tel.: +421 465 494 587  
www.schulke.sk  
schulkesk@schuelke.com

**Výrobca**  
Schülke & Mayr GmbH  
Robert-Koch-Str. 2  
22851 Norderstedt, Germany  
Phone +49 40 - 52100 - 0  
Fax +49 40 - 52100 - 318  
www.schuelke.com  
info@schuelke.com