

schülke -†



Koncentrovaný kvapalný dezinfekčný prípravok na báze kombinácie KAS a amínu, určený na dezinfekciu a umývanie plôch a povrchov zdravotníckych prostriedkov.

Na citlivé
povrchy

terralin[®] protect

Naše Plus

- Bez obsahu aldehydov
- Výborné čistiace vlastnosti
- Použitie v horšie vetrateľných miestach
- Vhodný k dezinfekcii vodoliečebných vaní

Oblasti použitia

Terralin protect je vhodný na dezinfekciu a čistenie plôch a povrchov neinvazívnych zdravotníckych prostriedkov vo všetkých priestoroch zdravotníckych zariadení (operačné sály, JIP, neonatalógia). Je vhodný tiež na citlivé plasty (akryláty, plexi).

Účinnosť

Baktericídny, virucídny na BVDV / Vaccinia (HIV/HBV/HCV/ polyoma SV40/Noro/Rota, tuberkulocídny, fungicídny. Pre bližšie informácie o mikrobiologickej účinnosti a expozičnej dobe kontaktujte zástupcov spoločnosti Schülke.

Návod na použitie

Terralin protect sa používa na povrchy vopred zbavené viditeľného znečistenia. Na získanie požadovanej koncentrácie pracovného roztoku rozmiešajte potrebné množstvo prípravku vo vlažnej vode. Na získanie správnej koncentrácie použite aplikačné pomôcky (odmerky, pumpy, zmiešavač). Plochy a povrchy predmetov utrite pomocou textílie (mop, utierka a pod.) namočené v pracovnom roztoku. Nemiešajte so žiadnymi inými čistiacimi či dezinfekčnými prípravkami. Nie je vhodný na finálnu dezinfekciu kritických a semikritických zdravotníckych prostriedkov.

CE 0297



Zloženie

100 g prípravku **terralin protect** obsahuje nasledujúce aktívne látky:

- 22 g Benzalkonium chloride
- 17 g Phenoxyethanol
- 0,9 g Aminoalkylglycine

Fyzikálno-chemické vlastnosti

Bod vzplanutia	48 °C / Metóda: DIN 51755 Part 1
Dynamická viskozita	cca. 21 mPa.s / 20 °C / Metóda: ISO 3219
Farba	zelený
Forma	kvapalina
Hustota	cca. 1,01 g/cm ³ / 20 °C
pH	8,6 / 100 % / 20 °C

Zvláštne upozornenia

Určené pre profesionálny trh. Miešanie s inými produktami môže mať negatívny vplyv na účinnosť produktu. Pri používaní prípravku odporúčame nosiť rukavice.

Doba expirácie: 36 mesiacov.

Objednávkové informácie

Názov produktu	Balenie	Číslo výrobku
Terralin protect 2l	5/Kartón	181605
terralin protect -PL-CZ-SK- 5 l KA	1/Kanister	70002786

Životné prostredie

Spoločnosť Schülke vyrába svoje produkty inovatívnymi a bezpečnými postupmi šetrnými k životnému prostrediu, hospodárne a za dodržania vysokých štandardov kvality.

Typ prípravku

Zdravotnícky prostriedok triedy IIa



Spoločnosť Schülke & Mayr GmbH je držiteľom povolenia pre výrobu liečiv podľa § 13 ods. 1 zákona o liekoch a držiteľom certifikátov GMP pre lieky.

Distribútor
Schulke SK, s.r.o.
Moštenická 3
971 01 Prievidza
Slovenská republika
tel.: +421 465 494 587
www.schulke.sk
schulkesk@schuelke.com

Výrobca
Schülke & Mayr GmbH
Robert-Koch-Str. 2
22851 Norderstedt, Germany
Phone +49 40 - 52100 - 0
Fax +49 40 - 52100 - 318
www.schuelke.com
info@schuelke.com