

# schülke →



Tekutý dezinfekčný prípravok na báze etanolu určený na hygienickú a chirurgickú dezinfekciu rúk. Bez farbív a parfémov.

## desderman<sup>®</sup> pure

### Naše Plus

- Vďaka špeciálnym kozmetickým prísadám chráni, zjemňuje a vyživuje pokožku
- Zabraňuje vysušovaniu pokožky a zaisťuje mimoriadnu regeneračnú starostlivosť
- Zanecháva pocit jemnej a pružnej pokožky
- Neobsahuje žiadne farbivá či parfémy; je vhodný aj pre citlivé a alergické osoby
- Dermatologicky testovaný
- Splňa klinické štandardy FDA (TFM)
- Účinný proti širokému spektru baktérií a vírusov

### Oblasti použitia

**Desderman pure** je vhodný na hygienickú a chirurgickú dezinfekciu rúk vo všetkých typoch zdravotníckych zariadeniach, v laboratóriách, vo farmaceutickej a kozmetickej výrobe, v inštitúciách, potravinárstve, športových zariadeniach a v komunálnom sektore.

### Účinnosť

Baktericídny, fungicídny, mykobaktericídny, virucídny.  
Pre bližšie informácie o mikrobiologickej účinnosti a expozičnej dobe kontaktujte zástupcu spoločnosti Schülke.

### Návod na použitie

Prípravok sa neriedi a aplikuje sa na čisté a suché ruky. Aplikujte do dlane ruky dostatočné množstvo prípravku a vtierajte do pokožky rúk tak, aby boli všetky miesta na rukách mokré po stanovenú dobu expozície, ktorá je uvedená na etikete.



# desderman<sup>®</sup> pure

## Zloženie

100 g desderman pure obsahuje nasledujúce aktívne látky:

- 78,2 g etanol 96 %
- 0,1 g bifenyl-2-ol

Ďalšie zloženie:

- 10 g propan-2-ol
- zjemňujúce látky

### Fyzikálno-chemické vlastnosti

Bod vzplanutia	16 °C / Metóda : DIN 51755 Part 1
Farba	bezfarebný
Forma	kvapalina
Hustota	cca. 0,83 g/cm <sup>3</sup> / 20 °C
pH	Nevztahuje sa

## Zvláštne upozornenia

Určené pre profesionálny trh. Termoelektrické prístroje používajte až po úplnom zaschnutí prípravku. Vysoko horľavá kvapalina a pary. Chráňte pred teplom, horúcimi povrchmi, iskrami, otvoreným plameňom a inými zdrojmi zapálenia. Zákaz fajčenia. Skladovať v uzatvorených obaloch, mimo zdroja sálavého tepla, ohňa, nápojov, krmív, potravín a slnečného žiarenia. Teplota skladovania: -20 až +25°C. Doba expirácie: 60 mesiacov.

## Objednávkové informácie

Názov produktu	Balenie	Číslo výrobku
Desderman pure 1 l, TLD	6/Kartón	116812
Desderman pure 60 ml	24/Kartón	116811
Desderman pure 500 ml s pumpičkou, KL	20/Kartón	116816

## Životné prostredie

Spoločnosť Schülke vyrába svoje produkty inovatívnymi a bezpečnými postupmi šetrnými k životnému prostrediu, hospodárne a za dodržania vysokých štandardov kvality.

## Typ prípravku

Biocídny prípravok



Používajte biocídy bezpečným spôsobom. Pred použitím si vždy prečítajte označenie a informácie o prípravku.



Spoločnosť Schülke & Mayr GmbH je držiteľom povolenia pre výrobu liečiv podľa § 13 ods. 1 zákona o liekoch a držiteľom certifikátov GMP pre lieky.

**Distribútor**  
Schulke SK, s.r.o.  
Moštenická 3  
971 01 Prievidza  
Slovenská republika  
tel.: +421 465 494 587  
www.schulke.sk  
schulkesk@schuelke.com

**Výrobca**  
Schülke & Mayr GmbH  
Robert-Koch-Str. 2  
22851 Norderstedt, Germany  
Phone +49 40 - 52100 - 0  
Fax +49 40 - 52100 - 318  
www.schuelke.com  
info@schuelke.com